



BURN FREE® é um hidrogel utilizado nos primeiros socorros para queimaduras térmicas ou queimaduras solares. Foi projetado para remover o calor da queimadura enquanto resfria, acalma e hidrata a área afetada, resultando em um grande alívio da dor e impedindo o agravamento da queimadura.

O BURN FREE® hidrogel é um dispositivo médico fabricado em área limpa controlada; todas as etapas do processo de fabricação são validadas e controladas, desde o recebimento da matéria-prima até a finalização do processo produtivo com avaliações microbiológicas, pH e viscosidade das amostras.

O dispositivo médico é validado através de ensaios físico-químicos, organolépticos e microbiológicos, consolidados no estudo de estabilidade de 5 anos, garantindo, desta forma, toda sua segurança e eficácia durante o prazo de validade. Devido ao controle no processo produtivo e todas as validações microbiológicas, o dispositivo não passa por esterilização após a etapa de produção.

**INDICAÇÕES:** BURN FREE® é um hidrogel utilizado nos primeiros socorros para queimaduras térmicas ou queimaduras solares.

**MODO DE USO - FRASCOS DE 60 mL e 120 mL**

O frasco do BURN FREE® possui um lacre de segurança aluminizado no bocal interno para preservar o conteúdo e uma trava na tampa rosqueada.

Remova a tampa rosqueada do frasco e retire o lacre localizado no bocal. Reinstale a tampa e libere a trava de saída, pressionando-a para baixo. Aplique uma camada espessa do hidrogel sobre a superfície do corpo afetada pela queimadura térmica ou queimadura solar e deixe por, no mínimo, 30 a 60 minutos. Reaplique uma camada sempre que necessário. Não esfregue na pele, pois pode aumentar a lesão causando mais dor.

O BURN FREE® hidrogel deve ser utilizado até que não haja mais dor ou vermelhidão no local da lesão. Para efetuar a remoção do produto, recomenda-se a utilização de solução fisiológica a 0,9% ou uma fonte de água potável devidamente tratada.

**ILUSTRAÇÃO DO MODO DE USO:**

- Rosquear no sentido anti-horário para abrir.*
- Retirar o lacre aluminizado do bocal.*
- Reinstalar a tampa no sentido horário para fechar.*
- Liberar a trava de saída pressionando-a para baixo.*
- Aplicar uma camada do hidrogel sobre a queimadura e espalhar sem esfregar.*

**MODO DE USO - SACHÊS DE 3,5g**

O sachê deve ser aberto pela parte lateral superior da embalagem onde consta um recorte facilitador para abertura. Aplique uma camada espessa do hidrogel sobre a superfície do corpo afetada pela queimadura térmica ou queimadura solar e deixe por, no mínimo, 30 a 60 minutos. Reaplique uma camada sempre que necessário. Não esfregue na pele, pois pode aumentar a lesão causando mais dor.

O BURN FREE® hidrogel deve ser utilizado até que não haja mais dor ou vermelhidão no local da lesão. Para efetuar a remoção do produto, recomenda-se a utilização de solução fisiológica a 0,9% ou uma fonte de água potável devidamente tratada.

**ILUSTRAÇÃO DO MODO DE USO:**

- Puxar a aba de recorte facilitador para abertura do sachê.*
- Remover a tira do sachê que possibilitará a saída do produto.*
- Aplicar uma camada do hidrogel sobre a queimadura e espalhar sem esfregar.*

**FREQUÊNCIA DE TROCAS:** A frequência das trocas do hidrogel deve ser monitorada por um profissional de saúde e não deve exceder 36 horas. BURN FREE® hidrogel deve ser trocado quando o curativo secundário apresentar sinais de saturação ou em trocas rotineiras. Para feridas infectadas, realizar a troca em, no máximo, 24 horas.

**ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES:** Não utilize este produto com data de validade vencida ou se a embalagem estiver violada. Toda queimadura é um acidente sério e deve ser avaliada por um médico, mesmo após o uso deste produto. Caso ocorra qualquer reação ou sensibilidade ao produto, suspender a utilização e procurar a assistência médica.

O BURN FREE® não é indicado em casos de queimaduras químicas. Nestes casos, a depender do elemento químico envolvido, utilizar a Solução DIPHOTERINE® ou Solução HEXAFLUORINE®.

Para mais informações sobre queimaduras químicas e aquisições dos dispositivos médicos, acesse: <https://diphoterine.com.br>.

**ATENÇÃO:** Uso externo, não deve ser ingerido. Não deve ser inserido nos olhos. Mantenha fora do alcance das crianças. Caso sinta algum desconforto, procurar assistência médica. Uso adulto e pediátrico. O BURN FREE® hidrogel é atóxico, não irritante, não aderente e não passa por um processo de esterilização após a fabricação.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:** O BURN FREE® hidrogel deve ser armazenado na sua embalagem original em local seco, em temperatura ambiente (15°C – 30°C).

**COMPOSIÇÃO:** 96,79% de água purificada e o 3,21% distribuídos em base mineral, emulsificantes e conservantes.

**DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS**

	Número de referência
	Lote de Fabricação - Impresso no rótulo
	Data de expiração - 5 anos
	Produto permanece estável entre 15 e 30 °C
	Produto não estéril
	Não utilizar caso embalagem esteja violada
	Produto poder ser reutilizado desde que respeite instruções de uso
	Produto não contém látex na composição

**CONTEÚDO:** Recipiente plástico contendo 60mL(2oz) e 120mL(4oz).

**FABRICADO POR:**  
 Water-Jel Technologies, LLC –  
 50 Broad Street, Carlstadt, New Jersey, 07072 – USA  
 Patente nº: 5.9858.420

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:**  
 Globaltek Comércio e Representações Ltda.  
 Rua Ilhéus, nº 268, Rio Vermelho, Salvador – Bahia – CEP: 41940-570  
[www.globaltek.com.br](http://www.globaltek.com.br)

**REGISTRO NA ANVISA:** 80260810004  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Mário G.K. Monteiro - CRQ nº 07100002.  
**Validade:** 5 anos

Mario Gilberto Kool Monteiro  
 Representante Legal  
 Diretor Presidente

Mario Gilberto Kool Monteiro  
 Responsável Técnico  
 Químico  
 CRQ/BA: 07100002